

PACKAGING



ЗМІСТ НАБОРУ

1 манекен Practi-Man Advance, 1 посібник користувача, 5 легенів, 2 клапани - усе в зручній сумці для транспортування (з килимком)

ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ



Цей продукт успішно пройшов найсуворіший контроль якості перед тим, як залишити фабрику. Однак у разі будь-якої несправності, спричиненої дефектами збірки та/або компонентів, прочитайте гарантію та зв'яжіться з офіційним дистриб'ютором у регіоні.

VICEDO MARTÍ, S.L. гарантує, що цей продукт не матиме дефектів у матеріалі та виготовленні на момент покупки протягом ДВОХ РОКІВ з дати рахунку-фактури на покупку.

Якщо протягом гарантійного періоду виникне дефект продукту, спричинений виробничим процесом, несправністю матеріалу та/або виготовленням, споживач повинен повідомити про це офіційного дистриб'ютора протягом 10 робочих днів після того, як він дізнався про дефект, і на розсуд офіційного дистриб'ютора, продукт буде відремонтовано або замінено.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

Деталі та документація: копія рахунку-фактури, що підтверджує покупку вашого продукту, потрібна для гарантійного покриття. Крім особливостей придбання товару, в рахунку-фактурі має бути зазначена така інформація: ім'я та адреса покупця.

Виятки. Ця гарантія виключає наступне:

- Пошкодження та / або дефекти продукту в результаті неправильного використання або недбалості користувача, включаючи використання продукту не за призначенням.
- Пошкодження та/або дефекти, викликані використанням зовнішніх агентів, таких як вально або інші шкідливі хімікати чи корозійні речовини.
- Пошкодження та/або дефекти через неправильне обслуговування або відсутність очищення.
- Пошкодження та/або дефекти, що виникають внаслідок використання частин манекена, виготовлених не виробником манекена.

Географічне покриття: Гарантія поширюється на всі країни, де цей продукт продається дистриб'ютором VICEDO MARTÍ, S.L. або присвоєно VICEDO MARTÍ, S.L.

Скасування гарантії: Гарантія на товар скасовується:

- У разі пошкодження, спричиненого ремонтом, виконаним особами, які не є уповноваженими сервісними агентами VICEDO MARTÍ, S.L., та/або якщо в манекені використовуються деталі чи аксесуари, відмінні від оригінальних частин чи аксесуарів, виготовлених VICEDO MARTÍ, S.L.
- шляхом зміни даних у рахунку-фактурі, товарному чеку або пакувальній накладній.



VICEDO MARTÍ S.L. TEL. +34 965 554 708
C/ Ávila, 2 - 03440 Ibi - SPAIN

www.practiman.com - info@practiman.com - international@practiman.com



МАНЕКЕН ДЛЯ СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАНІМАЦІЇ

PRACTI-MAN

Advance

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ФУНКЦІЇ



TWO IN ONE SIMULATOR

Тренування з реанімації дорослого та дитини на одному манекені




Відпрацювання прийому вивільнення щелепи




РЕАЛІСТИЧНА ФУНКЦІЯ ДИХАННЯ:

Система дихання з робочим носоглотковим повітропроводом

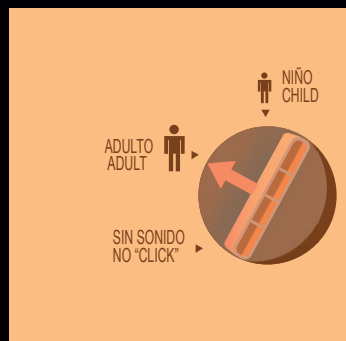


ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ЖОРСТКОСТІ КЛІТИНИ СЕЛЕКТОР ГРУДНОЇ

Дорослий, дитина та тест

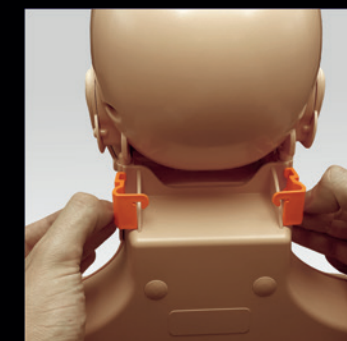

КЛІПСИ ФІКСУВАННЯ ГОЛОВИ

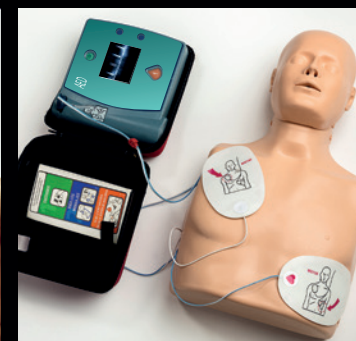

ТРЕНУВАННЯ ЕЛЕКТРО-ДЕФІБРИЛЯЦІЇ

Подушечки не залишають слідів на шкірі.

PRACTI-MAN
CPR TRAINING SOLUTIONS
by Vicedo Marti

ЗБИРАННЯ МАНЕКЕНУ PRACTI-MAN ADVANCE



Зняти покриття з грудей



Зняти покриття обличчя.



Переконайтеся, що голова правильно прикріплена до двох буферів, що з'єднують її з тулубом.




Перемістіть легеню нижче щелепи.



Підключіть клапан до легені.



Переконайтеся, що клапан правильно прикріплений до голови.

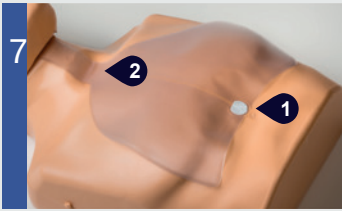

Переконайтесь:
1. Закріпити легке на позначеному кружечку за допомогою наклепки.
2. Легеня вільно лежить на шії.




Притисніть шкіру переконавшись, що ніс, рот і верхній язичок знаходяться в правильному положенні.



Помістіть покриття грудей і прикріпіть до шпильок.

PRACTI-MAN ADVANCE - ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО МАНЕКЕНУ

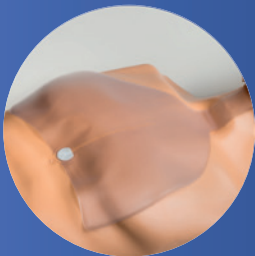

ЛЕГЕНІ
(Ref. SP-001
(AD))



КЛАПАН
(Ref. SP-002
(AD))



ПОКРИТТЯ
ОБЛИЧЧЯ
(Ref. Face-MB (AD))



ПОКРИТТЯ
ГРУДЕЙ
(Ref. Chest-MB (AD))

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЇ


Щоб забезпечити максимальну гігієну, виробник рекомендує ретельно очищати Practi-Man Advance після кожного використання відповідно до наведених нижче інструкцій:




Після кожного тренування тренажер необхідно дезинфікувати. Відокремте шкіру обличчя від голови, щоб очистити губи та обличчя.



Для кращого очищення помістіть шкіру обличчя в ємність з водою та дезинфікуючим засобом, обережно очистіть і тримайте сухим для правильної роботи.

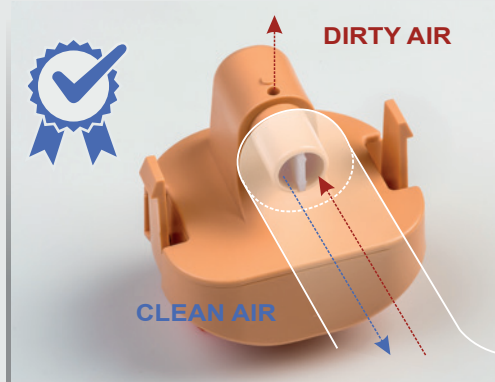

Після кожного використання клапан Practi-Man Advance необхідно продезінфікувати та дати йому висохнути для правильного функціонування.

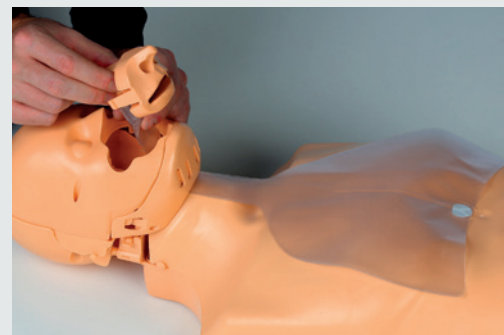

Легеня Practi-Man Advance є напівводнорозовою, і її можна використовувати для тренування групи людей під час сесії без необхідності її змінювати. Якщо під час тренування грудна клітка перестає підніматися, переконайтеся, що легені не вологі. Якщо так, замініть його новим.

ЗАХИСТ ПРОТЯГОМ ТРЕНІНГУ



Захист лицьовим щитком під час навчання забезпечує максимальну гігієну під час практики штучного дихання рот в рот.



Пакування - 100 серветок

Щоб забезпечити правильне очищення манекена, використовуйте дезинфікуючі серветки.